


Lábmasszírozó készülék

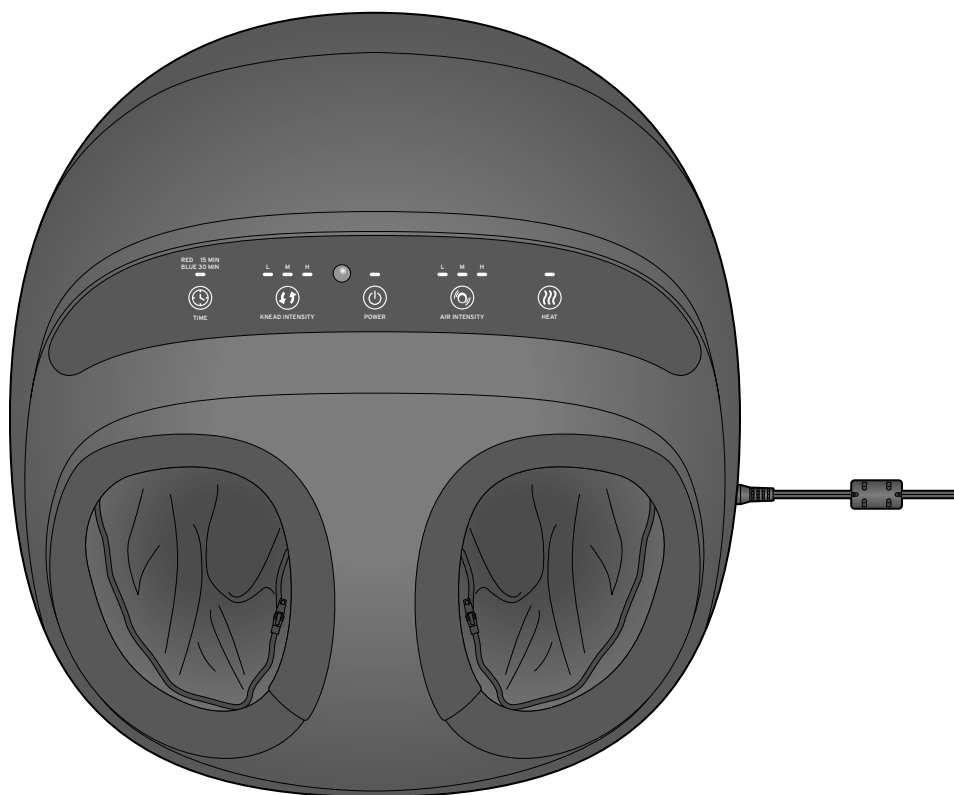

Kedves Vásárlónk!

Új lábmasszírozó készülékében forgó masszázsfekék és légzsákok vannak, amelyek nyomó és dagasztó mozdulatokkal utánozzák a láb reflexzóna masszírozását.

A lábmasszírozó készülék elősegítheti ...

... a lábak vérkeringésének felpezsdítését,

... a sejtregenerációt,

... a lábak revitalizálását és élénkítését,

... az izomfeszülések oldását.

Ebben a használati útmutatóban leírtuk, hogyan használhatja biztonságosan és szakszerűen ezt a masszázskészüléket. Vegye figyelembe, hogy a rosszul kivitelezett vagy túl hosszú masszázs ellazulás helyett merevséghez vezethet.

Tartalom

3 Megjegyzések az útmutatóhoz

3 Biztonsági előírások

6 Termékrajz (tartozékok)

8 Üzembe helyezés

8 Használat

8 Be- és kikapcsolás

8 Időzítő beállítása

9 A lábmasszírozás sebességének beállítása

9 A légtömörítés erősségének beállítása

9 Melegítő funkció be- és kikapcsolása

9 A távirányító használata

9 Elemcsere

10 Tisztítás és tárolás

11 Üzemzavar / Hibaelhárítás

11 Műszaki adatok

12 Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fennálló sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károkra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lábmasszírozó készülék a lábak nyugtató masszírozására alkalmas. Élénkíti a lábak vérkeringését és segíti az izomfeszülések oldását.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti, terápiás vagy gyógyászati célokra nem használható.



A termék száraz belső helyiségekben használható. A veszélyek elkerülése érdekében, ne használja pl. a fürdőszobában vagy a szaunában.

A készüléket állatokon használni tilos.

Ne használja a készüléket ...

- ... lábbetegség vagy lábsérülés esetén (pl. nyílt seb, szemölcs, lábgomba, kiütés, duzzadt vagy gyulladt lábak),
- ... lábszár- vagy lábfejfájdalom esetén (pl. érgyulladás, visszér),
- ... magas vagy kóros vérnyomás, csonttritkulás, cukorbetegség vagy trombózis esetén,

... ha súlyos betegségben szenved vagy a lábát operálták,

... ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik,

... ha szívproblémái vagy rosszindulatú daganata van,

... keringési zavarok vagy neurológiai rendellenességek esetén,

... ha nem érzi jól magát, illetve

... ismeretlen eredetű fájdalmak esetén,

... olyan személyeknél, akik nem érzékelik megfelelően a hőt.

Kisgyerekek érzékenyebben reagálnak a hőre.

Gyógyszer bevétele vagy bizonyos betegségek, mint pl. cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak.

Mozgássérültek vagy betegeskedők esetleg nem tudják magukra felhívni a figyelmet, ha túlságosan melegük van.

... 3 éven aluli gyermekeknél, tehetetlen, beteg, illetve hőérzékelési zavarokkal küzdő személyek esetén.

Ha kétségei lennének, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával!

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. A gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek ...
 - ... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve
 - ... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel,
 - ... csak felügyelet mellett vagy
 - ... csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és ...
 - ... az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromosság következtében

- A készüléket, a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne érjen nedves kézzel a készülékhez.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, amelynek hálózati feszültsége megegyezik annak műszaki adataival. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
 - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
 - ... minden használat után,
 - ... vihar esetén,
 - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati adapteren vagy a csatlakozókábelben sérülés látható, vagy ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt se cserélje ki saját kezűleg. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A termék csak a mellékelt hálózati adapterrel használható.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a lábníylások belső bélésin látható-e az elhasználódás vagy rongálódás bármilyen jele. Ha ilyen jeleket észlel, ne használja tovább a lábmasszírozó készüléket.

Vigázat - tűz- és robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok“)
- Használat közben ne takarja le a készüléket (pl. takaróval vagy törölközővel).
- Ne használja a készüléket benzin vagy más gyúlékony anyag közelében.

Vigázat - sérülésveszély

- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk



- Kizárólag ülé helyzetben használja. Ne álljon fel, ha lábait a készülékbe helyezte.
- A készülék maximális üzemeltetési ideje 30 perc. Az ismételt használatbavétel előtt várjon legalább 30 percig, hogy a készülék lehűljön a környezeti hőmérsékletre.

- Óvja az elemeket/akkumulátorokat a túlzott hőtől.


Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha az elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők a kifolyt sav okozta károk.

- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy ápolószerek a termék csúszásgátló talpait károsítják és felpuhítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a felületen.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény keféket és hasonlókat.


Termékrajz (tartozékok)

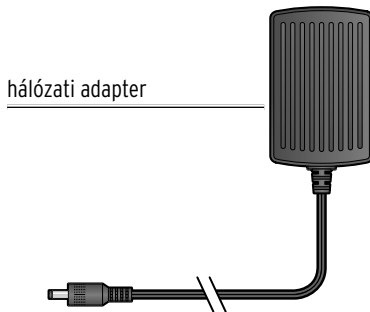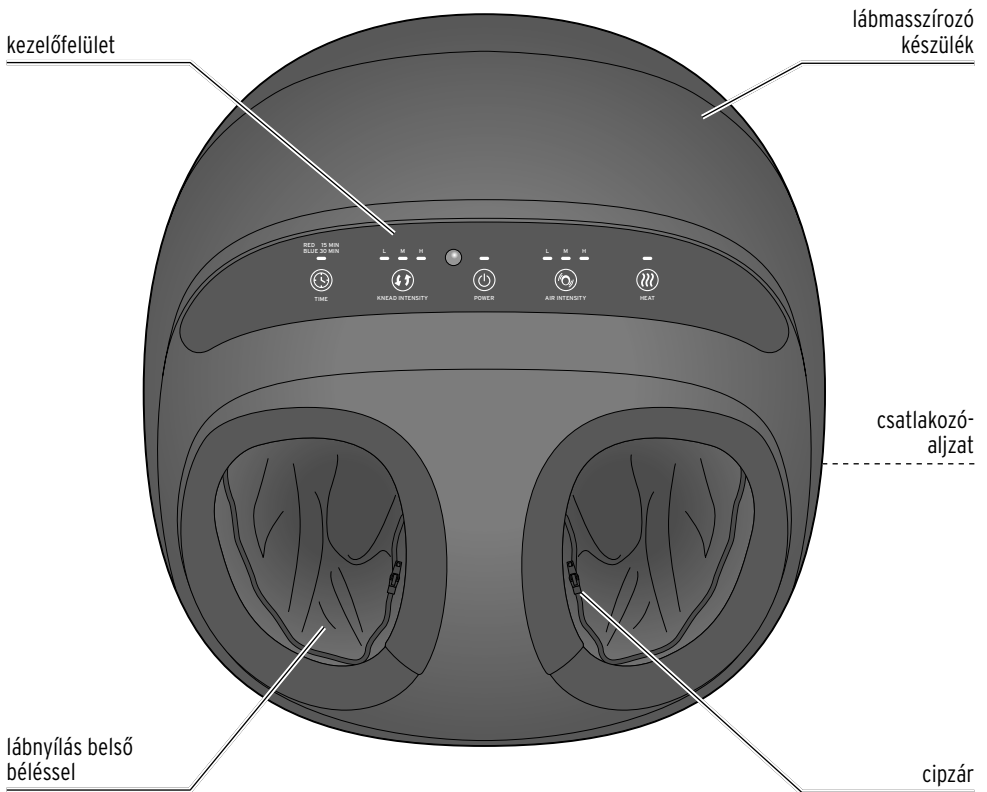

Távírányító

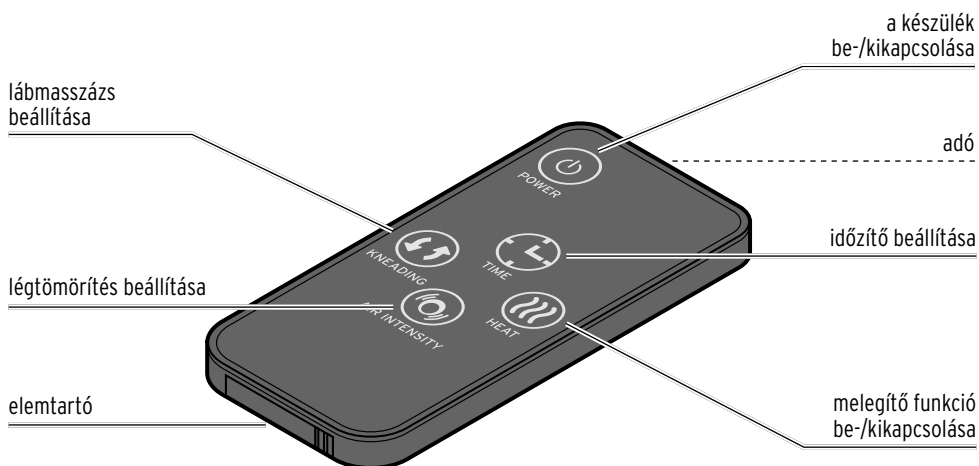

Kezelőfelület

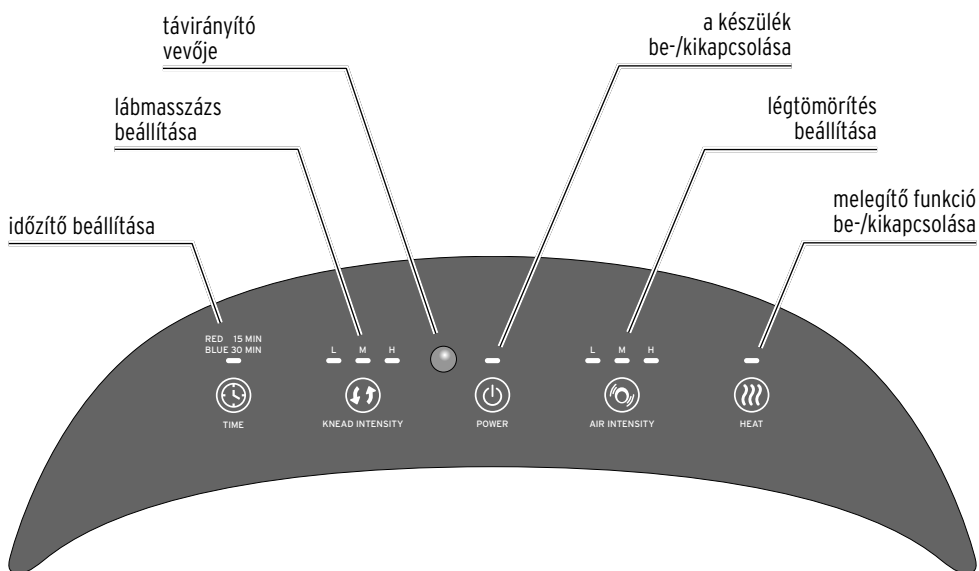

Üzembe helyezés




VESZÉLY gyermekek esetében -


életveszély fulladás / kisméretű tárgyak lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Húzza le az védőfóliát a kezelőfelületről.

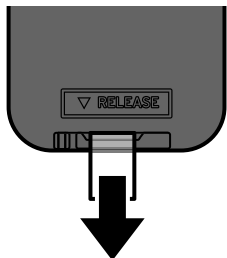

3. Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

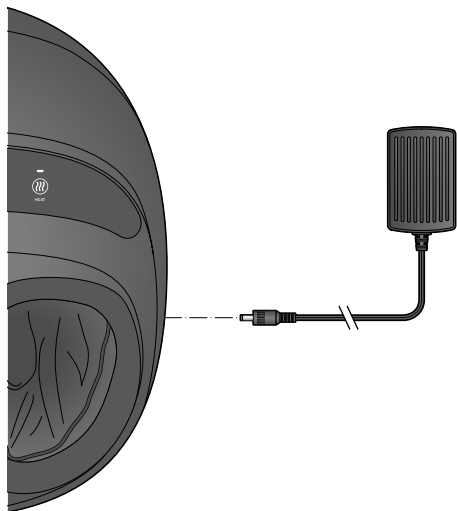

4. Dugja be a hálózati adapter csatlakozó-dugóját a masszázskészülék aljzatába.
5. Dugja be a hálózati adaptert egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.
6. Egy hangjelzés hallatszik és a **Power** kontroll-lámpa villog.

Használat

TUDNIVALÓ - anyagi károk

A készülék maximális üzemeltetési ideje 30 perc. Az ismételt használatbavétel előtt várjon legalább 30 percig, hogy a készülék lehűljön a környezeti hőmérsékletre.

1. Üljön egy székre kényelmes testhelyzetben.
2. Dugja be lábait teljesen a készülék lábnyílásába.
3. Vegyen fel kellemesen laza testtartást.

Be- és kikapcsolás

- ▷ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Egy hangjelzés hallatszik és a **Power** kontroll-lámpa folyamatosan világít.

15 perces masszázs van beállítva a készüléken, és ez látható a kijelzőn. A lábmasszázs funkció  és a légtömörítés  intenzitása alacsonyra van állítva (L), a melegítő funkció  pedig be van kapcsolva.

A megfelelő kontroll-lámpák világítanak.

- ▷ A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Egy hangjelzés hallatszik, a készülék leáll és minden kontroll-lámpa kialszik.

Időzítő beállítása

A bekapcsolásnál 15 perces üzemidő van gyárilag beállítva, az adott kontroll-lámpa pirosan világít.

- ▷ A 30 perces üzemidő beállításához nyomja meg a  gombot.

A kontroll-lámpa kékén világít.

- ▷ A 15 perces üzemidőre való visszaállításához nyomja meg ismét a  gombot.

Ha nem kapcsolta ki a készüléket hamarabb a  gombbal, akkor az az üzemidő lejártá után automatikusan kikapcsol.

A lábmasszírozás sebességének beállítása

A bekapcsoláskor a készüléken az alacsony (L) lábmasszírozó fokozat van beállítva.

▷ A lábmasszázs sebességének megváltoztatásához nyomja meg a gombot.

A sebesség a következőképpen változik: közepes (M) > nagy (H) > kikapcsolás > (L) stb.

A légtömörítés erősségének beállítása

A bekapcsoláskor a készüléken az alacsony légtömörítő fokozat (L) van beállítva.

▷ A légtömörítés erősségének megváltoztatásához nyomja meg a gombot.

A légtömörítés sebessége a következőképpen változik: közepes (M) > nagy (H) > kikapcsolás > (L) stb.

Melegítő funkció be- és kikapcsolása

A bekapcsoláskor a melegítő funkció be van kapcsolva és a kontroll-lámpa folyamatosan világít.

▷ A melegítő funkció kikapcsolásához nyomja meg a gombot.

A kontroll-lámpa kialszik.

▷ Nyomja meg ismét a gombot a melegítő funkció bekapcsolásához.

A távirányító használata

Minden funkciót a távirányítóval is vezérelhet.

▷ Irányítsa a távirányítót az adóval a vevőre, és nyomja meg az adott gombot.

Készülék be- és kikapcsolása.

Időzítő beállítása.


A lábmasszírozás sebességének beállítása.

Melegítő funkció be- és kikapcsolása.

A légtömörítés erősségének beállítása.

Elemcsere

Ha a készülék már nem reagál a távirányítóra, akkor ki kell cserélni az elemet.

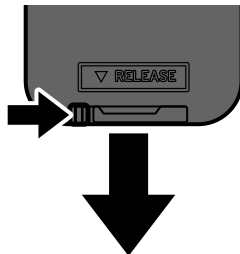


1. Nyomja el a reteszelt a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.




Ha pusztá kézzel érinti meg az elemeket, akkor az elemek érintkezőin szennye-

ződések keletkezhetnek, amelyek bizonyos körülmények között szigetelő hatásúak lehetnek. Az elem behelyezéséhez száraz, puha ruhát használjon.

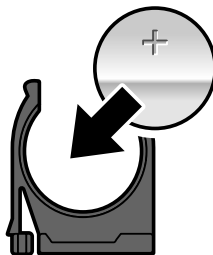

2. Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a + jel legyen felül).

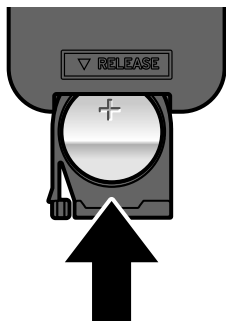

3. Teljesen tolja vissza az elemtartót.
Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Tisztítás és tárolás




VESZÉLY - elektromosság következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- A belső bélések legyenek teljesen szárazak, mielőtt visszatenné azokat a lábnnyílásba, és a készüléket csatlakoztatja az áramhálózatra.
- Semmi esetre se kapcsolja be a lábmasszírozó készüléket a belső bélések melegítő funkcióval történő szárítása céljából.

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és hagyja egy pár percre lehűlni.
2. A kisebb foltokat egy kendővel vagy nedves szivaccsal távolítsa el.

A lábnnyílás belső béléseit le lehet venni, és ki lehet mosni. A belső bélés mosásához a következőképpen járjon el:

3. Nyissa ki a cipzárakat a lábnnyílásokon.
4. Húzza ki a belső béléseket a lábnnyílásokból.
5. Mossa ki a belső bélést kézzel, langyos vízzel és egy kevés kímélő mosószerrel.
6. Várja meg, hogy a belső bélés teljesen megszáradjon a levegőn, csak azután helyezze vissza a készülékbe. A szárításhoz ne helyezze fűtőtestre, és ne szárítsa a szárítógépben.

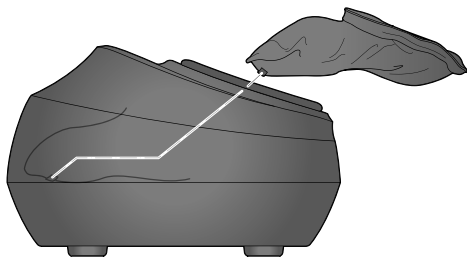

7. Helyezze vissza a belső bélést a lábnnyílásba.
 8. A belső bélések és a lábnnyílások tépőzárral vannak ellátva. Ügyeljen arra, hogy a tépőzárak megfelelően egymáson helyezkedjenek el, és húzza be a cipzárakat.
- ▷ A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	• Be van dugva a hálózati adapter a csatlakozóaljzatba • A csatlakozódugó megfelelően illeszkedik az aljzatba?
A masszázsfjek nagyon lassan köröznék.	• Túl erősen nyomja rá a lábait a masszázsfjekre? A lábakat csak finoman helyezze rá.
A készülék működés közben kikapcsol.	• A készülék túlhevült. Kapcsolja ki a készüléket. A készülék ismételt bekapcsolása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és hagyja a készüléket szobahőmérsékletre lehűlni. • A készülék 30 percig folyamatosan be volt kapcsolva? 30 perc után a készülék biztonsági okokból automatikusan kikapcsol. Hagyja a készüléket középhőmérsékletre hűlni.

Műszaki adatok

Modell:	MD-50230B
Cikkszám:	647 030
Elemek:	1db CR2025/3 V (Li) Névleges energia: 0,45 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Hálózati adapter:	
Modell:	IVP1200-2500G
Gyártó:	(Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd., 1F/3F-5F, BLDG 5, No. 943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an), Xiamen, 361000, P.R. China)
Érintésvédelmi osztály:	II 
Bemenet:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	12.0 V 2.5 A 30.0 W
	(a  szimbólum egyenáramot jelent)
	(a  szimbólum a csatlakozó polaritását jelzi)
Átlagos hatékonyság	üzemelés közben: > 86,95 % alacsony terhelésnél (10%): > 85 %
Teljesítményfelvétel üresjáratban:	< 0,1 W
Érintésvédelmi osztály:	III 
Rövid üzemmód:	30 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Németország)



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Modell:

MD-50230B

Gyártó:

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Németország)